



REHABILITACIÓN

▶ TST-SP-7207

COMPRESA DE GEL MEDSTAR PARA CUELLO EN FORMA DE "U" CON CUBIERTA DE PVC 42 X 36.5 CMS



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Compresa de gel con diseño en forma de U.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 42 cm. x 36.5 cm.

Con cubierta durable de PVC (Policloruro de Vinilo o Cloroetileno)

Producto de Gel No Tóxico.

Tiempo de vida 5 años.

IDEAL PARA

Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente.

Ideal en el cuidado de lesiones y golpes.

Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico.

Se recomienda su uso para disminuir los dolores de cabeza y musculares, cólicos menstruales, inflamación y dolor provocado por las extracciones dentales, en caso de fiebre, sangrado de la nariz, así como en pequeñas quemaduras.

Si se mantiene en el refrigerador, estará lista para utilizarse en cualquier momento.

Debe mantenerse en el congelador al menos dos horas para aplicar terapia fría, sacándola 5 min antes de ser utilizada.

Para la terapia con calor debe ser sumergida en agua caliente entre 7 y 10 min si está a temperatura ambiente, pero si se encuentra congelada tarda aproximadamente 14 minutos en calentarse.

Para ser calentada en el microondas, es necesario considerar la potencia del aparato y probar por lapsos cortos hasta obtener la temperatura deseada.

Para evitar quemaduras, se recomienda siempre utilizarla envuelta en una toalla.

BENEFICIOS

Permite llevar a cabo terapia fría y caliente con el mismo producto.

Cómoda, flexible y fácil de aplicar a cualquier parte del cuerpo.

Cuenta con certificación: ISO 9001, ISO 13485, GMP, CE, FDA y SGS.